



**Für eine
natürliche Familienplanung.
Baby-Comp. Der sichere Zykluscomputer.**

BABY-COMP®

Baby-Comp mit der einzigartigen Software. Für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch.

Baby-Comp ist so programmiert, dass er den Eisprung im Zyklus der Frau aufgrund der morgendlichen Temperaturmessung exakt erkennt und anzeigt. Seine Ergebnisse zieht er aus der Auswertung von hunderttausenden von Zyklen von x-tausend Frauen.

Baby-Comp. Ein fast alles Könnler.

- Er zeigt Ihre Schwangerschaft frühzeitig an und bestätigt sie nach dem 18.Tag.
- Er errechnet automatisch den Geburtstermin.
- Während Ihrer fruchtbaren Tage macht er Geschlechtsprognosen.

Dank seiner integrierten Zyklus- und Planungsstatistik hilft er Ihnen bei der Planung Ihres Kindes:

Er erkennt z.B. am Gelbkörperwert, ob Ihr Hormonhaushalt ausgeglichen ist oder ob eine Schwäche vorliegt.

Klinisch getestet.

Die täglichen Fruchtbarkeitsprognosen von Baby-Comp haben einen Pearl-Index von 0.7 oder einfacher ausgedrückt von 99.3%.

Familienplanung leicht gemacht.

- 1** Sie messen jeden Morgen 50-60 Sekunden lang die Aufwachtemperatur unter der Zunge.
- 2** Bei Menstruation, geben Sie diese ein.
- 3** Baby-Comp wertet Ihre Daten aus und gibt Ihnen für die nächsten 24 Stunden Lichtsignale:

- heisst «unfruchtbar»
- heisst «fruchtbar»
- bedeutet «Lern- und Übergangsbereich».



Medizinische Grundlagen.

- Jede Frau hat nur einen Eisprung pro Zyklus. *
- Danach kann die Eizelle höchstens noch nach 18 Stunden befruchtet werden.
- Nach einem Geschlechtsverkehr sind die Spermien im Körper der Frau höchstens 120 Stunden (5 Tage) bewegungs- und befruchtungsfähig.

Also, an nur sechs von durchschnittlich 28 Tagen kann eine Schwangerschaft eintreten. 5 Tage vor dem Eisprung und am Tag des Eisprungs.

* Falls in seltenen Fällen zwei oder mehr Eisprünge vorkommen, finden diese innerhalb von 24 Stunden statt.

Zykluscomputer im Valley Electronics Sortiment:

Lady-Comp – der bewährte Zykluscomputer für die natürliche, weibliche und sichere Verhütung.

pearly – der kleine Verhütungscomputer für unterwegs.

VERTRIEB: irl22.de
Homöopathie & Ökologie
Carola Irl UG (haftungsbeschränkt)



Stockdorfer Weg 10
D-82131 Buchendorf

shop@irl22.de
www.irl22.de
Tel.: +49 (0) 89 - 89 35 630
Fax.: +49 (0) 89 - 89 30 53 21

